

AAASWatch Plus

取扱説明書

株式会社アイフォーカス

公開日：2022年9月15日



目次

◇	初めに	3
●	同梱物	3
●	SIM カードの挿入	3
●	充電	4
●	電源のオン/オフ、スリープの解除	4
●	装着	5
◇	製品詳細	6
●	部品名称	6
●	仕様	7
◇	その他	8
●	【警告】取り扱いに関する重要な情報	8
●	アップデート情報の確認	10
●	お問い合わせ先	10

✧ 初めに

📦 同梱物

パッケージには、下記内容物が同梱されています。

- ・AAASWatch Plus 本体 × 1
- ・磁気充電ケーブル × 1
- ・取扱説明書 × 1

📦 SIM カードの挿入



AAASWatch Plus で使われる SIM カードは Nano-SIM カードです。

本体の上側面に SIM トレイがあります。

SIM トレイを取り出し、SIM カードの切り欠きの位置を確認したうえ、カードをトレイに装着します。

切り欠きがあるので、一方向にしか収まりません。

※AAASWatch Plus 本体の電源を切った状態で装着してください。

※うまく装着できない場合は、代理店または株式会社アイフォーカスにご相談ください。

充電

AAASWatch Plus には磁気充電ケーブルが同梱されています。

充電ケーブルを電源アダプター（別売）に、アダプターを電源コンセントに差し込みます。

充電ケーブルを本体にマグネット吸着させます。

充電が開始されると音が鳴り（消音モードにしていない場合）、充電中の緑色マークが文字盤に表示されます。

電源のオン/オフ、スリープの解除

◆電源を入れる：AAASWatch Plus の電源が切れている場合は、右下の黒いサイドボタンを長押しします。電源が入ると、株式会社アイフォーカスロゴそして文字盤が表示されます。

◆電源を切る：本体右下の黒いサイドボタンを長押しします。

◆画面のスリープを解除する：

デフォルトでは、本体右下の黒いサイドボタンを押下することで解除できません。

「手首を上げてスリープ解除」を設定で有効にしてから、手首を上げると解除し、手首を下げると再度スリープ状態になります。

装着

AAASWatch Plus を手首の適切な位置に正しいフィット感で着けます。

各センサーが正しく機能するためには、AAASWatch Plus の裏面が皮膚に接触している必要があります。

きつすぎる、または緩すぎる場合、心拍センサーなどの読み取り性能に影響する点にご留意ください。

※アレルギー反応が出る場合、直ちに腕から外して医師にご相談ください。

製品詳細

部品名称



- ・心拍センサー：心拍数と血圧（拡張期/収縮期血圧）を測定します。
- ・磁気充電ピン：磁力によって充電ケーブルにくっつけることで充電します。
- ・マイク：音声通話、チャットの際に使用されます。
- ・体温センサー：体温を測定します。
- ・スピーカー：音声通話の際に使用されます。
- ・SIM トレイ：Nano-SIM カードをトレイに挿入します。
- ・SOS ボタン：長押しすることで、予め登録した緊急連絡先に電話します。
- ・電源ボタン：
長押しすることで、電源のオン/オフを切り替えます。

画面表示がオフのとき、1 回押すと、スリープを解除します。

画面表示が文字盤のとき、1 回押すと、画面消灯します。

画面表示が文字盤以外のとき、1 回押すと、前の画面に戻ります。

仕様

OS	RTOS
SIM カード	Nano-SIM カード
モーター	○
通信方式	4G・Bluetooth
4G LTE バンド	1, 3, 8, 19, 38, 39, 40, 41
NFC	○
バッテリー	650mAh
駆動時間	75h (待機時間) 48h (通常使用時)
防塵防水	IP67
サイズ	47.5(直径)×15mm(ベルトなし)
重量	50g

スクリーン	1.28"/240*240/TFT
シェル素材	PC+ABS
電圧	DC 5V/1A
充電タイプ	磁気充電 マグネット 2ピン
スピーカー・マイク	○

◇ その他

🚩 【警告】取り扱いに関する重要な情報

- ・メーカー推奨付属品を利用してください。
- ・AAASWatch Plus を解体したり、改造したりしないでください。
- ・充電ケーブルを破損させないでください。
- ・可燃性ガスを使用する場合や高濃度酸素環境等、火災や爆発の恐れがある場合、保管および使用しないでください。
- ・耐水防塵性能を有していますが、時間とともに劣化することがあり、完全防水ではありません。
- ・温度変化の激しい場所、60℃以上及び 0℃以下の場所、高圧の場所、ほこりや静電気の影響を受ける場所で使用しないでください。
- ・落としたり、強い衝撃を加えたりすると画面やケースが割れる場合があります。

す。破損している状態のものを使用しないでください。

・乾燥状態と清潔に保ち、汗、香水、洗剤、防虫剤、日焼け止め、油等の液体が AAASWatch Plus に付着している場合、できる限り早めに清掃してください。腐食性の洗浄剤や化学薬品に触れないようにしてください。

・医療機器ではありません。病気やその他の症状について診断を下すには医療機関に相談してください。

・電磁場を発生される部品および無線送信機が含まれています。医療機器を利用している場合、医師および医療機器メーカーにお問い合わせください。また、航空機内や病院等無線機器の使用が禁止されている区域では、AAASWatch Plus の通信をオフにしてください。

アップデート情報の確認

当社はこの取扱説明書の内容を事前告知なしに変更または更新する権利を保留します。

また、システムバージョンアップにより、機能追加する場合があります。

AAASWatch Plus 取扱説明書、ファームウェア、アプリ等のアップデート情報について、当社 HP または下記 QR コードにて確認してください。



お問い合わせ先

株式会社アイフォーカス

<https://i-focus.co.jp/>

AAASWatch サポートチーム : aaaswatch@i-focus.co.jp